

硬化速度・余剰セメント除去の タイミングを最適化

ポロッと取れる余剰セメント

ジーセム ONE neo の余剰セメントは、歯肉縁下や歯間部でちぎれにくく、どんな症例でも綺麗に除去できます。



スムーズな硬化で診療をスピーディに

余剰セメントは、口腔内セット後、約1分～1分30秒の間、またはタックキュア（光照射1秒程度*）で、半硬化状態になり一塊で除去できます。

* 光照射の性能や照射時間により異なります。



幅広いニーズにお応えできる全4色

色調“ホワイト(オベーク)”は余剰セメントの取り残しの確認が容易で、遮蔽性が高くメタルコア症例でも審美的に仕上がります。さらに従来の2色に加え、シェードの色調調整に便利なAO3と、透明性の高いトランスルーセントを追加しました。



正確な計量・経済的な採取

CD (カートリッジデリバリー) システムの採用により、セメント採取が簡便に行えます。またエコストップパー (別売) を装着することで1クリックでインレー、2クリックでクラウンの適量 (目安) の採取を誰にでも簡単にでき、経済的に使用できます。



CD ディスペンサーⅢのレバーにエコストップパーを装着するだけでセット完了。



なめらかで軽い練和感

ペースト性状が柔らかく、なめらかで軽い練和感、2つのペーストは固さも同じで馴染みがよく安定した物性が得られます。



操作しやすいペースト性状

練和されたペーストは、流動性を抑え塗布しやすい性状です。圧接時の浮き上がりの心配がなく、圧接後は垂れにくく歯肉縁下に流れ込みにくいペースト性状です。



被膜厚さ 約5μm

歯科接着用レジンセメント

ジーシー ジーセム ONE neo

製品専用サイトはこちら

ジーセム ONE neo



https://www.gcdental.co.jp/gcemone-neo/



色調●4色=ユニバーサル(A2)、ホワイト(オベーク)、AO3、トランスルーセント
 包装・希望医院価格●1面・カートリッジ(7.6mL)1本、練和紙(No.22)1冊、テクニカルチャート1部 =¥6,000
 〈バリュウパック〉
 色調●2色=ユニバーサル(A2)、ホワイト(オベーク)
 包装・希望医院価格●1面・カートリッジ(7.6mL)3本、練和紙(No.22)1冊、テクニカルチャート1部 =¥16,200
 管理医療機器 228AKBZX00104000

[色調の選び方]

ジーセム セラスマートのメタルコアオベーク色をご使用の方は、

→

ジーセム ONE neoのホワイト(オベーク)色をおすすめ。金属または濃淡差の激しい支台歯を、適載したい症例におすすめ。

歯冠修復物接着用プライマー ジーシー G-マルチプライマー



包装・希望医院価格●1面:4mL 1本=¥8,400
 管理医療機器 228AABZX00003000
 製造販売元 株式会社ジーシーデンタルプロダクツ

支台歯・窩洞接着用プライマー ジーシー ジーセム ONE 接着強化プライマー



包装・希望医院価格●1面:4mL 1本=¥5,000
 管理医療機器 228AKBZX00104000

■ 修復物側・支台歯、窩洞側ともに簡便で
 強固な接着を実現する1液性のプライマー

接着性モノマー	修復物側 G-マルチプライマー	支台歯、窩洞側 接着強化プライマー	接着対象
リン酸エステル系モノマー [MDP] ^{※1}	○	○	歯質、非貴金属、ジルコニア
チオリン酸エステル系モノマー [MDTP] ^{※2}	○	○	貴金属
シランカップリング剤 [γ-MPTS]	○	—	セラミックス(長石系・リチウムシリケート系) ハイブリッドレジン(CAD/CAM適合)
4-MET	—	○	歯質

※1 MDP:10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate
 ※2 MDTP:10-methacryloyloxydecyl dihydrogen thiophosphate

関連製品

ジーシー CD ディスペンサー Ⅲ



包装・希望医院価格●1面:1個=¥2,500
 一般医療機器 09B2X00010G00063

ジーシー CD ディスペンサー Ⅲ エコストップパー



包装・希望医院価格●1面:1個=¥640
 一般医療機器 09B2X00010G00063
 ※CDディスペンサー(金属)は使用できません。

プラスチックヘラ



ブルー(No.1)
 色調●2色=青、白
 包装・希望医院価格●1本(No.1)=¥130

ピンク(No.4)
 色調●1色=ピンク
 包装・希望医院価格●1本(No.4)=¥130

※掲載の価格とジーシー研究所測定値の参考データは、2019年1月現在のものです。
 ※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。
 ※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しましては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 株式会社ジーシー / 製造販売元 株式会社ジーシー
 東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼1丁目7番1号

DIC (デンタルインフォメーションセンター) 支店
 お客様窓口 ☎0120-416480 ●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
 受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く) 営業所
 ●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
 ●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286
<http://www.gcdental.co.jp>

特約店
 有限会社 西京歯科商会
 TEL(075)314-5377
 FAX(075)314-5384